

SEROLOGINIŲ TYRIMŲ ĖMINIŲ VADOVAS

Analitė	Pirminis mėginys, mėgintuvėlio priedas	Tyrimo atlikimo terminas	Stabilumas pirminiame mėginyje	Serumas/plazma +15 – (+25)°C	Serumas/plazma +2 – (+8)°C	Serumas/plazma (-15) – (-25) °C	Pristatymo trukmė ir temperatūra
HEMATOLOGINIAI TYRIMAI							
Automatinis hematologinis (kraujo) tyrimas	Kraujas, EDTA	1 d.d.	4 val.	-	Negalima laikyti šaldytuve	-	Per 4 val. +15 – (+25) °C
Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG)	Kraujas, EDTA	1 d.d.	2 val.	-	-	-	kuo greičiau
Kraujo grupės pagal ABO sistemą	Kraujas, mėgintuvėliai be priedų, Na citratas arba EDTA	1 d.d.	48 val.	48 val.	48 val.	-	1 d.d. +2 - (+8)°C
Rh D faktoriaus	Kraujas, mėgintuvėliai be priedų, Na citratas arba EDTA	1 d.d.	48 val.	48 val.	48 val.	-	1 d.d. +2 - (+8)°C
Antieritrocitiniai antikūnai (Kumbso reakcija)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1 d.d.	48 val.	48 val.	48 val.	6 mėn.	1 d.d. +2 - (+8) °C
Protrombino laiko (PT, SPA,INR)	Kraujas, Na citratas	1 d.d.	2 val.	4 val.	Nelaikyti šaldytuve	4 sav.	1-4 val. +15 - +25 °C
Aktyvinto dalinio tromboplastino laikas (ADTL)	Kraujas, Na citratas	1 d.d.	4 val.	Plazmoje 4 val.	Nelaikyti šaldytuve	4 sav.	2 val. +15 - +25 °C
Fibrinogenas	Kraujas, Na citratas	1 d.d.	Plazmoje 8 val.	Plazmoje 8 val.	Nelaikyti šaldytuve	2 mėn.	2 val. +15 - +25 °C
Glikozilintas hemoglobinas (Hb1Ac)	Kraujas, EDTA	1 d.d.	3 d.	3 d.	7 d.	6 mėn.	1-5 d.d. +2 - (+8) °C
Feritinas nustatymas kraujo serume (FERRI)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	1 diena	7 d.	7 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C

Analitė	Pirminis mėginys, mėgintuvėlio priedas	Tyrimo atlikimo terminas	Stabilumas pirminiame mėginyje	Serumas/plazma +15 – (+25)°C	Serumas/plazma +2 – (+8)°C	Serumas/plazma (-15) – (-25) °C	Pristatymo trukmė ir temperatūra
Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų tyrimai (su ŽIV1 O)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	-	5 d.	4 sav.	6 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų ir p24 Ag nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1 d.d.	-	5 d.	4 sav.	3 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV 1) antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1 – 2 d.d.	-	5 d.	4 sav.	3 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
ŽIV antikūnų patvirtinimas imunoblotingu (WB, LIA)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1 – 7 d.d.	-	-	5 d.	1 m.	1-4 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
<i>Herpes simplex</i> viruso 1 (HSV 1) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų, nugaros smegenų skystis	1 – 7 d.d.	-	3 d.	7 d.	6 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
<i>Herpes Simplex</i> 2 tipo IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų, nugaros smegenų skystis	1 – 7 d.d.	-	3 d.	7 d.	6 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
<i>Herpes simplex</i> viruso 1/2 (HSV 1/2) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų, nugaros smegenų skystis	1 –10 d.d.	-	3 d.	7 d.	6 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
<i>Varicella zoster</i> viruso (VZV) IgM nustatymas	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų, nugaros smegenų skystis	1 – 7 d.d.	-	3 d.	14 d.	6 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C

Analitė	Pirminis mėginys, mėgintuvėlio priedas	Tyrimo atlikimo terminas	Stabilumas pirminiame mėginyje	Serumas/plazma +15 – (+25)°C	Serumas/plazma +2 – (+8)°C	Serumas/plazma (-15) – (-25) °C	Pristatymo trukmė ir temperatūra
<i>Varicella zoster</i> viruso (VZV) IgG nustatymas	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų, nugaros smegenų skystis	1 – 7 d.d.	-	3 d.	14 d.	6 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
EBV IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1 – 2 d.d.	-	3 d.	14 d.	6 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
EBV IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1 – 2 d.d.	-	3 d.	14 d.	6 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Hepatito A viruso bendrų antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	2 d.d.	-	5 d.	4 sav.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Hepatito A viruso IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	2 d.d.	-	5 d.	4 sav.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Hepatito B viruso anticor bendrų antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	2 d.d.	-	5 d.	4 sav.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Hepatito B viruso (HBV) antikūnų IgM (HBcor IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	2 d.d.	-	5 d.	4 sav.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Hepatito B viruso paviršinio antigeno nustatymas	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	2-5 d.d.	-	5 d.	4 sav.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C

Analitė	Pirminis mėginys, mėgintuvėlio priedas	Tyrimo atlikimo terminas	Stabilumas pirminiame mėginyje	Serumas/plazma +15 – (+25)°C	Serumas/plazma +2 – (+8)°C	Serumas/plazma (-15) – (-25) °C	Pristatymo trukmė ir temperatūra
Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno neutralizacijos reakcija	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	5 d.d.	-	5 d.	4 sav.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Hepatito B viruso e antigeno nustatymas	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	2 d.d.	-	5 d.	4 sav.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Hepatito B viruso anti-e bendrų antikūnų nustatymas	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	2 d.d.	-	5 d.	4 sav.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Hepatito B viruso anti-HBs antikūnų nustatymas	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	2 d.d.	-	5 d.	4 sav.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Hepatito C viruso antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	2-5 d.d.	-	5 d.	4 sav.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Hepatito C viruso (HCV) IgG nustatymas imunoblotingo metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	7 d.d.	-	-	5 d.	1 m.	1-4 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Hepatito D viruso antikūnų nustatymas	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	7 d.d.	-	5 d.	4 sav.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Hepatito E viruso IgM nustatymas	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	10 d.d.	-	5 d.	4 sav.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Hepatito E viruso IgG nustatymas	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	10 d.d.	-	5 d.	4 sav.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C

Analitė	Pirminis mėginys, mėgintuvėlio priedas	Tyrimo atlikimo terminas	Stabilumas pirminiame mėginyje	Serumas/plazma +15 – (+25)°C	Serumas/plazma +2 – (+8)°C	Serumas/plazma (-15) – (-25) °C	Pristatymo trukmė ir temperatūra
<i>Toxoplasma gondii</i> IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	2 d.d.	-	3 d.	14 d.	3 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Toxoplazmozės IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	2 d.d.	-	3 d.	14 d.	3 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
<i>Toxoplasma gondii</i> IgG avidiškumo nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	2 d.d.	-	3 d.	14 d.	3 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
<i>Herpes simplex</i> viruso 1 (HSV 1) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1 – 7 d.d.	-	3 d.	7 d.	6 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
<i>Herpes Simplex</i> 2 tipo IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1 – 7 d.d.	-	3 d.	7 d.	6 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
<i>Herpes simplex</i> viruso 1/2 (HSV 1/2) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1 –10 d.d.	-	3 d.	7 d.	6 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Citomegalo viruso (CMV) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	2 d.d.	-	7 d.	14 d.	6 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Citomegalo viruso (CMV) IgM nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	2 d.d.	-	7 d.	14 d.	6 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
<i>Rubella</i> (raudonukės) IgG nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	2-4 d.d.	-	3 d.	21 diena	3 mėn.	1-5 d.d.

Analitė	Pirminis mėginys, mėgintuvėlio priedas	Tyrimo atlikimo terminas	Stabilumas pirminiame mėginyje	Serumas/plazma +15 – (+25)°C	Serumas/plazma +2 – (+8)°C	Serumas/plazma (-15) – (-25) °C	Pristatymo trukmė ir temperatūra
							Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
<i>Rubella</i> (raudonukės) IgM klasės antikūnų nustatymas	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	2-4 d.d.	-	3 d.	21 diena	3 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Toxoplazmozės IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	2 d.d.	-	3 d.	14 d.	3 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Toxoplazmozės IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	2 d.d.	-	3 d.	14 d.	3 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Toksoplazmozės IgG antikūnų avidiškumo nustatymas	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	2 d.d.	-	3 d.	14 d.	3 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Trichineliozės IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	2 d.d.	1-2 d.	2 d.	5 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
<i>E.granulosus</i> IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-10 d.d.	1-2 d.	2 d.	14 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
<i>E.multilocularis</i> IgG (Em2,Em18) antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-10 d.d.	1-2 d.	2 d.	14 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
<i>E.multilocularis</i> IgG (Em18) antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-10 d.d.	1-2 d.	2 d.	14 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C

Analitė	Pirminis mėginys, mėgintuvėlio priedas	Tyrimo atlikimo terminas	Stabilumas pirminiame mėginyje	Serumas/plazma +15 – (+25)°C	Serumas/plazma +2 – (+8)°C	Serumas/plazma (-15) – (-25) °C	Pristatymo trukmė ir temperatūra
IgG antikūnų prieš <i>E. granulosus</i> ir <i>E. multilocularis</i> nustatymas -WB	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-5 d.d.	1-2 d.	-	14 d.	-	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Cisticerkozės IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	1-2 d.	-	5 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Cisticerkozės IgG antikūnų nustatymas WB	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-5 d.d.	1-2 d.	-	14 d.	-	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Amebiasės IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	1-2 d.	-	5 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
<i>Toxocara canis</i> IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu (Toksokarozės IgG antikūnų nustatymas)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	1-2 d.	-	5 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų, nugaros smegenų skystis	1-5 d.d.	1-2 d.	-	5 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų, , nugaros smegenų skystis	1-5 d.d.	1-2 d.	-	5 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Erkinio encefalito IgM klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų, , nugaros smegenų skystis	1-5 d.d.	1-2 d.	-	5 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Erkinio encefalito IgG klasės antikūnų	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be	1-5 d.d.	1-2 d.	-	5 d.	1 m.	1-5 d.d.

Analitė	Pirminis mėginys, mėgintuvėlio priedas	Tyrimo atlikimo terminas	Stabilumas pirminiame mėginyje	Serumas/plazma +15 – (+25)°C	Serumas/plazma +2 – (+8)°C	Serumas/plazma (-15) – (-25) °C	Pristatymo trukmė ir temperatūra
nustatymas imunofermentiniu metodu	priedų, nugaros smegenų skystis						Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Laimo ligos IgM nustatymas imunoblotingu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-5 d.d.	-	-	5 d.	1 m.	1-4 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Laimo ligos IgG nustatymas imunoblotingu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-5 d.d.	-	-	5 d.	1 m.	1-4 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Vakarų Nilo IgG imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-5 d.d.	-	-	5 d.	1 m.	1-4 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Vakarų Nilo karštligė, Japoniškas encefalitas, geltonoji karštinė, imunofluorescenciniu metodu nustatymas	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	1-2 d.	-	5 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Tropinių karštinių virusų (Denge, Zika, Čikungunija) antikūnų nustatymas imunoblotingu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	1-2 d.	-	5 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Dengės viruso Ak nustatymas	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	1-2 d.	-	5 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
ELISA metodas IgG antikūnams prieš difterijos sukėlėją nustatyti	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	1-2 d.	-	5 d.	1 m.	1-4 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
ELISA metodas IgG antikūnams prieš Kokliušo sukėlėją nustatyti	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-5 d.d.	1-2 d.	-	14 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C

Analitė	Pirminis mėginys, mėgintuvėlio priedas	Tyrimo atlikimo terminas	Stabilumas pirminiame mėginyje	Serumas/plazma +15 – (+25)°C	Serumas/plazma +2 – (+8)°C	Serumas/plazma (-15) – (-25) °C	Pristatymo trukmė ir temperatūra
ELISA metodas IgA antikūnams prieš Kokliušo sukėlėją nustatyti	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-5 d.d.	1-2 d.	-	14 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Tymų IgG klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų, nugaros smegenų skystis	5-7 d.d.	-	7 d.	14 d.	6 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Tymų IgM klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų, nugaros smegenų skystis	5-7 d.d.	-	7 d.	14 d.	6 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Parotito IgG klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-5 d.d.	-	7 d.	14 d.	6 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Parotito IgM klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-5 d.d.	-	7 d.	14 d.	6 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Hanta virusų IgG nustatymas imunoblotingu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	5 d.d.	-	-	5 d.	1 m.	1-4 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
<i>Chlamydia spp.</i> IgG nustatymas imunoblotingu	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	5 d.d.	-	-	5 d.	1 m.	1-4 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Imuninio atsako į M. tuberculosis (Quanti Ferone TB-Gold) nustatymas	Naudojamas vienas 5-6 ml tūrio ličio heparino mėgintuvėlis (žalias kamštelis). Paimama ≥ 5ml kraujo. Švelniai sumaišomas paimtas kraujas	2-7 d.d.	16 val.iki inkubacijos. Inkubuotas prieš centrifugavimą iki 3 d.	Inkubuoti prieš centrifugavimą iki 3 d.	Po centrifugavimo 28 d.	-	Transportuojant su ličio heparinu ar 4 mėgintuvėlius per 16 val. +18 - +24 °C

Analitė	Pirminis mėginys, mėgintuvėlio priedas	Tyrimo atlikimo terminas	Stabilumas pirminiame mėginyje	Serumas/plazma +15 – (+25)°C	Serumas/plazma +2 – (+8)°C	Serumas/plazma (-15) – (-25) °C	Pristatymo trukmė ir temperatūra
	siekiant ištirpinti mėgintuvėlyje esantį hepariną. Mėgintuvėlis tinkamai pažymimas su tikslu paėmimo laiku. Tokiai procedūrai naudojamas tik ličio heparino antikuaguliantas. Naudojant kitokius mėgintuvėlius tyrimo nebus galima atlikti. Arba specialūs 4 mėgintuvėliai. 1 ml į kiekvieną mėgintuvėlį (specialių mėgintuvėlių rinkinys), po kraujo pėmimo mėgintuvėliai bent 10 kartų švelniai pavartomi  1) Inkubacija 37 °C 16-24 val. 2) Centrifuguojami 2000-3000 x g (RCF) 15 min.						Inkubuoti mėginiai pažymimi ir pristatomi per 3 d.d. +2 - (+8) °C
IFR metodas IgG antikūnams prieš Bartoneliozės sukėlėją (Kačių įdrėskimo liga) nustatyti	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-5 d.d.	1-2 d.	-	14 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
IFR metodas IgM antikūnams prieš Bartoneliozės sukėlėją (Kačių įdrėskimo liga) nustatyti	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-5 d.d.	1-2 d.	-	14 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C

Analitė	Pirminis mėginys, mėgintuvėlio priedas	Tyrimo atlikimo terminas	Stabilumas pirminiame mėginyje	Serumas/plazma +15 – (+25)°C	Serumas/plazma +2 – (+8)°C	Serumas/plazma (-15) – (-25) °C	Pristatymo trukmė ir temperatūra
ELISA metodas IgG antikūnams prieš Mikoplazmozės sukelėją nustatyti	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-5 d.d.	1-2 d.	-	5 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
ELISA metodas IgM antikūnams prieš Mikoplazmozės sukelėją nustatyti	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-5 d.d.	1-2 d.	-	5 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
ELISA metodas IgM antikūnams prieš Chlamidijozės sukelėją nustatyti	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-5 d.d.	1-2 d.	-	5 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
ELISA metodas IgG antikūnams prieš Chlamidijozės sukelėją nustatyti	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-5 d.d.	1-2 d.	-	5 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
ELISA metodas IgA antikūnams prieš Jersinjozės sukelėją nustatyti	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-5 d.d.	1-2 d.	-	5 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Vidalio reakcija vidurių šiltinės, paratifų A, B sukelėjams nustatyti	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	1-2 d.	-	7 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Agliutinacijos metodas antikūnams prieš <i>Yersinia enterocolitica</i> O:3 ir O:9, <i>Yersinia pseudotuberculosis</i> T:1 nustatyti	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	1-2 d.	-	7 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
ELISA metodas IgG antikūnams prieš stabligės sukelėją nustatyti	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-5 d.d.	1-2 d.	-	5 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C

Analitė	Pirminis mėginys, mėgintuvėlio priedas	Tyrimo atlikimo terminas	Stabilumas pirminiame mėginyje	Serumas/plazma +15 – (+25)°C	Serumas/plazma +2 – (+8)°C	Serumas/plazma (-15) – (-25) °C	Pristatymo trukmė ir temperatūra
ELISA metodas IgG antikūnams prieš <i>Legionella pneumophila</i> nustatyti	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-5 d.d.	1-2 d.	-	5 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
ELISA metodas IgM antikūnams prieš <i>Legionella pneumophila</i> nustatyti	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-5 d.d.	1-2 d.	-	5 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
ELISA metodas IgG antikūnams prieš Jersinjozės sukėlėją nustatyti	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-5 d.d.	1-2 d.	-	5 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
ELISA metodas Ig (G, M, A) prieš tulielemijos sukėlėją nustatyti	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-5 d.d.	1-2 d.	-	5 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Vesternblo to (WB) metodas Ig (G, M, A) prieš tulielemijos sukėlėją nustatyti	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	1d.	-	48 val.	1 m.	1 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Bruceliozė IgM	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-5 d.d.	1-2 d.	-	5 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Bruceliozė IgG	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-5 d.d.	1-2 d.	-	5 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
<i>Legionella</i> antigeno nustatymas šlapime	Šlapimas	1-2 d.d.	1-14 d.	-	-	1 m.	1-2 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
<i>H. pylori</i> IgG	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-3 d.d.	-	-	3 d.	6 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C

Analitė	Pirminis mėginys, mėgintuvėlio priedas	Tyrimo atlikimo terminas	Stabilumas pirminiame mėginyje	Serumas/plazma +15 – (+25)°C	Serumas/plazma +2 – (+8)°C	Serumas/plazma (-15) – (-25) °C	Pristatymo trukmė ir temperatūra
RPR kokybinė reakcija (Sifiliui nustatyti RPR testas)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1 d.d.	-	-	Serumas 5 d. Plazma 72 val.	6 mėn.	1-3 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
TPHA-kokybinė hemagliutinacijos reakcija su <i>Treponema pallidum</i> antigenų (Sifiliui nustatyti TPHA testas)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1 d.d.	-	-	Serumas 5 d. Plazma 72 val.	6 mėn.	1-3 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
<i>Treponema pallidum</i> IgM/IgG nustatymas imunofermentiniu metodu (Sifilio IgM/IgG klasės antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	2 d.d.	-	3 d.	7 d.	6 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
<i>Treponema pallidum</i> IgG antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu (Sifilio IgG imunoblotingas (WB, LIA))	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	7 d.	-	-	2 sav.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
<i>Treponema pallidum</i> IgM antikūnų nustatymas imunoblotingo metodu (Sifilio IgM imunoblotingas (WB, LIA))	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	7 d.	-	-	2 sav.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Neurosifiliui nustatyti VDRL-CSF tyrimas	Nugaros smeginų skystis	2 d.d.	4 val.	4 val.	5 d.	6 mėn.	+2 - (+8) °C 1-3 d.d.
<i>Ureaplasma urealyticum</i> ir <i>Mycoplasma hominis</i> identifikavimas ir jautrumo antibiotikams nustatymas testų sistemos metodu	Šlapimas, išskyros iš lyties takų (speciali transportavimo terpė)	2-3 d.d.	20 val.	-	56 val.	-	+2 - (+8) °C per 1 d. d.

Analitė	Pirminis mėginys, mėgintuvėlio priedas	Tyrimo atlikimo terminas	Stabilumas pirminiame mėginyje	Serumas/plazma +15 – (+25)°C	Serumas/plazma +2 – (+8)°C	Serumas/plazma (-15) – (-25) °C	Pristatymo trukmė ir temperatūra
Limfocitų subpopuliacijų (CD3,CD4, CD8, CD19, CD14 ir kt.) nustatymas	Kraujas, EDTA	2 d.d.	48 val.	48 val.	-	-	24 val. +15 - +25 °C
C reaktyvaus baltymo nustatymas	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1 d.d.	3 sav. (2-8 °C)	11 d.	2 mėn.	3 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Specifiniai alergenai IgE maisto; IgE įkvėpjamieji	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	2-5 d.d.	3 sav. (2-8 °C)	14 d.	2 mėn.	2-3 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Specifiniai alergenai IgG maisto; IgG įkvėpjamieji	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	2-5 d.d.	3 sav. (2-8 °C)	14 d.	2 mėn.	2-3 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Specifiniai alergenai IgE mišri panelė maisto ir įkvėpjamųjų (36 alergenai paletėje)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	2-5 d.d.	3 sav. (2-8 °C)	14 d.	2 mėn.	2-3 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Narkotinių medžiagų (opiatai, THC, amfetaminas, metamfetaminas, ekstazi, benzodiazepinai, barbitūratai, metadonas, kokainas, katinonai) nustatymas šlapime	Šlapimas	1 d.d.	iš karto	iš karto	48 val.	-	1-2 d. d. 2-8 °C, ilgiau -20 °C
Bendras baltymas (TP)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų/nevalgyti prieš tyrimą	1 d.d.	1 d.	6 d.	4 sav.	6 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Albuminas	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų/nevalgyti prieš tyrimą	1 d.d.	6 d.	2,5 mėn.	5 mėn.	4 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C

Analitė	Pirminis mėginys, mėgintuvėlio priedas	Tyrimo atlikimo terminas	Stabilumas pirminiame mėginyje	Serumas/plazma +15 – (+25)°C	Serumas/plazma +2 – (+8)°C	Serumas/plazma (-15) – (-25) °C	Pristatymo trukmė ir temperatūra
Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas (ALT (SGPT))	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų/nevalgyti prieš tyrimą	1 d.d.	4 d.	3 d.	7 d.	7 d.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas (AST (SGOT))	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų/nevalgyti prieš tyrimą	1 d.d.	7 d. ↓	4 d.	7 d.	2 sav.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Alfa amilazė (AMYL)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų/nevalgyti prieš tyrimą	1 d.d.	4 d. ↓	7 d.	1 mėn.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Pankreatinė α-amilazė (P-amyl)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų/nevalgyti prieš tyrimą	1 d.d.	4 d. ↓	7 d.	1 mėn.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Šarminė fosfazė	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų/nevalgyti prieš tyrimą	1 d.d.	4 d. ↓	7 d.	7 d.	2 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Laktatdehidrogenazė (LDH)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų/nevalgyti prieš tyrimą	1 d.d.	1 val. ↑	7 d.	4 d.	6 sav.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Lipazė (LIP)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų/nevalgyti prieš tyrimą	1 d.d.	-	7 d.	3 sav.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Bendras bilirubinas (BIL-T)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų/nevalgyti prieš tyrimą	1 d.d.	1 val.tamsoje ↓ Laikyti tamsoje, ypač jeigu tyrimas atliekamas po 8 val.	1 diena, saugomas tamsoje	7 d., saugomas tamsoje	6 mėn., saugomas tamsoje	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C

Analitė	Pirminis mėginys, mėgintuvėlio priedas	Tyrimo atlikimo terminas	Stabilumas pirminiame mėginyje	Serumas/plazma +15 – (+25)°C	Serumas/plazma +2 – (+8)°C	Serumas/plazma (-15) – (-25) °C	Pristatymo trukmė ir temperatūra
Bilirubinas tiesioginis	Kraujas (serumas), be priedų/nevalgyti prieš tyrimą	1 d.d.	1 valanda tamsoje ↓ Laikyti tamsoje, ypač jeigu tyrimas atliekamas po 8 val.	2 d., saugomas tamsoje	7 d., saugomas tamsoje	6 mėn., saugomas tamsoje	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Šlapalas (UREA)	Kraujas (serumas), be priedų/nevalgyti prieš tyrimą	1 d.d.	1 diena ↑	7 d.	7 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Kreatininas (CREA)	Kraujas (serumas), be priedų/nevalgyti prieš tyrimą	1 d.d.	2 d. ↑	7 d.	7 d.	3 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Šlapimo rūgštis (UA)	Kraujas (serumas), be priedų/nevalgyti prieš tyrimą	1 d.d.	3 – 7 d. ↑	3 d.	7 d.	6 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Geležies koncentracijos nustatymas (FE)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų (EDTA, oksalatai, citratai trukdo) /nevalgyti prieš tyrimą	1 d.d.	1 d.	7 d.	7 d.	1-2 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Cholesterolis (CHOL)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų/nevalgyti prieš tyrimą	1 d.d.	2-7 d. ↑	7 d.	7 d.	3 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Trigliceridai (TG)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų/nevalgyti prieš tyrimą	1 d.d.	7 d. ↑	2 d.	7 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
DTL (didelio tankio lipoproteinai)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų/nevalgyti prieš tyrimą	1 d.d.	72 val. ↑	72 val.	7 d.	3 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C

Analitė	Pirminis mėginys, mėgintuvėlio priedas	Tyrimo atlikimo terminas	Stabilumas pirminiame mėginyje	Serumas/plazma +15 – (+25)°C	Serumas/plazma +2 – (+8)°C	Serumas/plazma (-15) – (-25) °C	Pristatymo trukmė ir temperatūra
MTL (mažo tankio lipoproteinai) frakcijomis	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų/nevalgyti prieš tyrimą	1 d.d.	1 d. ↑	1 d.	7 d.	3 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Gliukozė (GLU)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų/nevalgyti prieš tyrimą. Hemolizuoti ėminiai netiriami	1 d.d.	10 min. ↓, bet 7 d. su gliukozės inhibitoriumi (fluoridai, monojodacetatas, manozė)	8 val serume 3 d. plazma su natrio fluoridu	3 d. stabilizuota	1 d. ↓ stabilizuota	Per 4 val. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Kalis (K)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų/nevalgyti prieš tyrimą. Hemolizuoti ėminiai netiriami	1 d.d.	1 – 16 val. ↑↑	6 sav.	6 sav.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Natris (Na)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų/nevalgyti prieš tyrimą	1 d.d.	4 d. ↓	2 sav.	2 sav.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Chloras (Cl)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų/nevalgyti prieš tyrimą	1 d.d.	1 d. ↓	7 d.	4 sav.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8)°C
Kalcis (Ca)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų/nevalgyti prieš tyrimą	1 d.d.	2 d. ↓	7 d.	3 sav.	8 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Magnis (Mg)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų/nevalgyti prieš tyrimą	1 d.d.	1 d.↑	7 d.	7 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8)°C
Kreatinkinazė (CK)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be	1 d.d.	1 d.↑	7 d.	7 d.	1 m.	1-5 d.d.

Analitė	Pirminis mėginys, mėgintuvėlio priedas	Tyrimo atlikimo terminas	Stabilumas pirminiame mėginyje	Serumas/plazma +15 – (+25)°C	Serumas/plazma +2 – (+8)°C	Serumas/plazma (-15) – (-25) °C	Pristatymo trukmė ir temperatūra
	priedų/nevalgyti prieš tyrimą						Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8)°C
Fosforas (P)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų/nevalgyti prieš tyrimą	1 d.d.	1 val.↑↑↑	1 d.	4 d.	12 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8)°C
γ GGT nustatymas (γ-gliutamilttransferazė)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų/nevalgyti prieš tyrimą	1 d.d.	1 d. ↓	7 d.	7 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8)°C
Kiaušidžių vėžio žymenys (CA 125)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	2 d. ↓	3 d.	5 d.	3 mėn.	1-3 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8)°C
Krūčių vėžio žymuo (CA 15-3)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	7 d.	7 d.	7 d.	3 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8)°C
Kasos vėžio ir virškinamojo trakto žymuo (CA 19-9)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	7 d. ↓	7 d.	30 d.	3 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8)°C
Karcioembrioninis antigenas (CEA)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	7 d.	2 d.	7 d.	6 mėn.	1 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Bendro prostatos specifinio antigeno tyrimas (PSA)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	-	-	5 d.	6 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Laisvo prostatos specifinio antigeno tyrimas (Free PSA)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	-	-	5 d.	3 mėn. ↑	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C

Analitė	Pirminis mėginys, mėgintuvėlio priedas	Tyrimo atlikimo terminas	Stabilumas pirminiame mėginyje	Serumas/plazma +15 – (+25)°C	Serumas/plazma +2 – (+8)°C	Serumas/plazma (-15) – (-25) °C	Pristatymo trukmė ir temperatūra
Alfa feto proteinas (AFP)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	-	7 d.	7 d.	3 mėn.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Tireotropinis hormonas (TTH (TSH))	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	7 d.	1 d.	3 d.	3 m., šaldomas 1 kartą	1-2 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	7 d. ↓	2 sav.	2 sav., mėgintuvėliuose su skiriamuoju geliu 48 val.	1 m., šaldomas 1 kartą	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Liuteinizuojantis hormonas (LH)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	7 d.	3 d.	5 d.	1 m., šaldomas 1 kartą	1-4 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Laisvas tiroksinas (FT4)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	6 val.	2 d.	8 d.	3 mėn., šaldomas 1 kartą	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Prolaktinas (PRL)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	2 d.	5 d.	14 d.	1 m., šaldomas 1 kartą	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Estradiolis (E2)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	1 d.	1 d.	3 d.	1 m., šaldomas 1 kartą	1-2 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Progesteronas (PGN)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	7 d.	1 d.	4 d.	1 m., šaldomas 1 kartą	1-3 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Žmogaus chorioninis gonadotropinas (hCG beta)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	2 d.	2 d.	7 d.	1 m., šaldomas 1 kartą	Serumas iki tyrimo pradžios

Analitė	Pirminis mėginys, mėgintuvėlio priedas	Tyrimo atlikimo terminas	Stabilumas pirminiame mėginyje	Serumas/plazma +15 – (+25)°C	Serumas/plazma +2 – (+8)°C	Serumas/plazma (-15) – (-25) °C	Pristatymo trukmė ir temperatūra
							+2 - (+8)°C 1-5 d.d.
Antikūniai prieš skyd liaukės peroksidazę (ATPO)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	-	-	2 d.	1 mėn., šaldomas 1 kartą	Per 1 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 - (+8) °C
Laisvas trijodtironinas (FT3)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	-	2 d.	8 d.	3 mėn., šaldomas 1 kartą	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 – (+8)°C
Testosteronas (TTE)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	7 d. 1 d. moterims ↑	1 d.	7 d.	1 m., šaldomas 1 kartą	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 – (+8)°C
Lytinius hormonus sujungiantis globulinas (SHBG)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	-	-	3 d.	1 mėn., šaldomas 1 kartą	1-2 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 – (+8)°C
Dehidroepiandrosterono sulfato (DHEA-SO4) nustatymas imunofermentiniu metodu (DHEA SO4)	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	2 d. ↓	1 d.	2 sav.	1 m., šaldomas 1 kartą	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 – (+8)°C
Vitaminas D	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	3 d.	3 d.	7 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 – (+8)°C
Vitaminas B12	Kraujas (serumas), mėgintuvėliai be priedų	1-2 d.d.	3 d.	3 d.	7 d.	1 m.	1-5 d.d. Serumas iki tyrimo pradžios +2 – (+8)°C saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių

↓ - Tiriamosios analitės koncentracija ėminyje mažėja.

↑ - Tiriamosios analitės koncentracija ėminyje didėja.