

VIRUSOLOGINIŲ TYRIMŲ ĖMINIŲ VADOVAS

Eil. Nr.	Mėginio pavadinimas ir/ar paėmimo vieta	Nuorodos paėmimui	Ėminio paėmimo priemonės	Pristatymo trukmė ir temperatūra	Ėminio laikymo trukmė ir temperatūra	Tyrimo trukmė	Pastabos
Poliomielito ir kitų enterovirusų išskyrimas							
1.	Išmatos	Kiekvienu įtariamo poliomielito, ūmaus vangaus paralyžiaus ar enterovirusinės infekcijos atveju 2 išmatų ėminius imti 14 dienų nuo simptomų pradžios laikotarpiu. Antrą ėminį imti ne vėliau kaip po 24-48 val. nuo pirmojo ėminio paėmimo.	Sterilus sandarus indelis	Paimti ėminiai laikomi ir transportuojami +4 +8°C temperatūroje ir per 72 val. nuo paėmimo turi būti pristatyti ištyrimui. Ėminiai pakuojami į sandarias dvigubas pakuotes.	Iki tyrimo pradžios +4 +8 °C (iki 48 val.) -20 °C (jei laikoma ilgiau nei 48 val.)	14-30 d. d.	
2.	Tepinėlis iš nosiaryklės	Imamas kaip galima greičiau po bėrimo atsiradimo. Steriliu tamponėliu imamas nosiaryklės epitelis ir patalpinamas į sterilią virusologinę transportinę terpę.	Sterilus tamponėlis, sterili virusologinė transportinė terpė (gali būti naudojami NVSPL paruošti mėgintuvėliai gripo tyrimams)	Paimti ėminiai laikomi ir transportuojami +4 +8 °C temperatūroje ir per 72 val. nuo paėmimo turi būti pristatyti ištyrimui. Ėminiai pakuojami į sandarias dvigubas pakuotes.	Iki tyrimo pradžios +4 +8 °C (iki 72 val.)	14-20 d. d.	
Gripo viruso išskyrimas							
3.	Tepinėlis iš nosiaryklės	-Pirmu sausu, steriliu tamponu braukiamos tonzilės, vėliau – minkštasis gomurys ir grįžtama prie ryklės užpakalinės sienelės; -Antru ir trečiu sausu, steriliu tamponu giliai įeinama į nosies ertmę (vienu į kairę	Sterilus tamponėlis, sterili virusologinė transportinė terpė (gali	Paimti ėminiai laikomi ir transportuojami +4 +8 °C temperatūroje ir per 72 val. nuo paėmimo turi būti pristatyti ištyrimui.	Iki tyrimo pradžios +4 +8 °C (iki 72 val.)	7-14 d. d.	

Eil. Nr.	Mėginio pavadinimas ir/ar paėmimo vieta	Nuorodos paėmimui	Ėminio paėmimo priemonės	Pristatymo trukmė ir temperatūra	Ėminio laikymo trukmė ir temperatūra	Tyrimo trukmė	Pastabos
		nosies landą, kitu į dešinę) ir braukiama sukamaisiais judesiais, stengiantis paimti kuo daugiau cilindrinio ir plokščiojo epitelio ląstelių, kuriose pirmomis ligos dienomis daugiausia lokalizuojasi gripo virusas; -Visi trys tamponai pamerkami į vieną mėgintuvėlį su transportine terpe ir nukerpami jų kotai, kad būtų galima mėgintuvėlį uždaryti.	būti naudojami NVSPL paruošti mėgintuvėliai gripo tyrimams)	Ėminiai pakuojami į sandarias dvigubas pakuotes.			
Ivairių virusų išskyrimas							
4.	Tepinėlis iš žaizdos	Imamas kaip galima greičiau po bėrimo/žaizdos atsiradimo. Steriliu tepinėliu imamas epitelis ir patalpinamas į sterilią virusologinę transportinę terpę.	Sterilus tamponėlis, sterili virusologinė transportinė terpė (gali būti naudojami NVSPL paruošti mėgintuvėliai gripo tyrimams)	Paimti ėminiai laikomi ir transportuojami +4 +8 °C temperatūroje ir per 72 val. nuo paėmimo turi būti pristatyti ištyrimui. Ėminiai pakuojami į sandarias dvigubas pakuotes.	Iki tyrimo pradžios +4 +8 °C (iki 72 val.)	7-20 d. d.	
5.	Smegenų skystis	Imama į sterilų mėgintuvėlį. CSF ar punktas imamas aseptiškai, mėginį ima gydymo įstaigos personalas.	Sterilus mėgintuvėlis	Paimti ėminiai laikomi ir transportuojami +4 +8 °C temperatūroje ir per 48 val. nuo paėmimo turi būti pristatyti ištyrimui. Ėminiai pakuojami į sandarias dvigubas pakuotes.	Iki tyrimo pradžios +4 +8 °C (iki 48 val.) -70 °C (jei laikoma ilgiau nei 48 val.)	7-20 d. d.	